



Woman secret

Jednokrokový prúžkový ovulačný test 20v1 „

Right time“

Určené na samodiagnostiku

Vybrali ste si vysokokvalitný ovulačný test **Woman secret „Right time“**.

Účel použitia:

Ovulačný test **Woman secret „Right time“** je určený pre kvalitatívnu detekciu hormónu LH, k rýchlemu a spoľahlivému zisteniu plodných dní ženy. Je rýchly a jednoducho použiteľný. Je to kvalitívny test, ktorý dokáže predpovedať, kedy má žena LH (luteinizačný hormón) zvýšený a každodenným použitím ovulačného testu ľahko zistiť, kedy sa blíži k ovulácii. Ovulačné testy - Woman secret „Right time“ pomáhajú denne sledovať ovuláciu a plodnosť. Test je určený na domáce použitie - na samodiagnostiku (samotestovanie).

Súhrn:

Jednokrokový prúžkový ovulačný test je imunochromatografický test in vitro na kvalitatívne a semikvantitatívne stanovenie ľudského luteinizačného hormónu (LH) v moči na predpovedanie času ovulácie u žien.

Zloženie:

Každé vrecko obsahuje jeden imunochromatografický test, ktorý obsahuje anti-LH protilátky a konjugáty v stabilizačnej matrici, ktorá obsahuje proteíny a azid sodný.

Obmedzenia:

- Jednokrokový prúžkový ovulačný test je určený len na diagnostické použitie in vitro.
- Zvýšené koncentrácie chorionického gonadotropínu (hCG) interferujú s testovaním LH.
- Netestujte vzorky od tehotných žien a ľudí s patologickými stavmi spôsobujúcich vyššie hladiny hCG.
- Nepoužívajte jednokrokový prúžkový ovulačný test ako antikoncepciu pomocku.

Princíp :

Luteinizačný hormón, skrátené LH, je pohlavný hormón produkovaný hypofýzou a je vždy prítomný v ľudskom moči. Jeho koncentrácia sa dramaticky zvyšuje a v najplodnejší deň kedy sa dosiahne jeho maximum dochádza k ovulácii, dozretiu vajíčok.

Toto zvýšenie LH spúšťa ovuláciu, proces, počas ktorého sa z vaječníka ženy uvoľní vajíčko. Pretože vajíčko môže byť oplodnené iba 6 až 24 hodín po ovulácii, je pre ženy, ktoré chcú otehotnieť, veľmi dôležité zistiť ovuláciu vopred testovaním nárast LH. Nárast LH signalizuje, že k ovulácii môže dôjsť v najbližších 24-48 hodinách. Ak bude mať pohlavný styk počas týchto 24-48 hodín po zistení nárastu LH hormónu, šance na počatie sa budú maximalizovať.

Abý ste sa uistili, môžete testovať dvakrát denne, raz v skoršom časovom rámci a raz v neskoršom časovom rámci.

Kedy začať s testom?

Pred použitím musíte odsledovať dĺžku svojho menštruačného cyklu, tzn. zistiť počet dní od prvého dňa Vašej menštruácie do dňa nasledujúcej menštruácie. Nižšie uvedená tabuľka Vám pomôže určiť, kedy by ste mali začať s testovaním. Testovanie opakujte každý deň, až pokiaľ test bude indikovať, že ovuláciu budete mať nasledujúcich 24-48 hodín. Ak chcete otehotnieť je najlepší čas mať pohlavný styk v tomto časovom rozmedzí.

Dĺžka cyklu	Začiatok testovania
< 35 dní	Deň po skončení menštruačného cyklu
≥ 35 dní	Tri dni po skončení menštruačného cyklu

Odber moču:

- Najlepší čas na testovanie je od 11:00 do 15:00 a od 17:00 do 22:00.
- Nepoužívajte prvý ranný moč. Skoré ranné testovanie sa neodporúča, pretože LH hormón sa objaví v moči až neskôr počas dňa.
- Používajte moč odobraný približne v rovnakom čase každého dňa testovania.
- Použite čistú a suchú nádobu.
- Znížte príjem tekutín 2 hodiny pred odberom vzorky moču, nakoľko môže dôjsť k zníženiu koncentrácie LH v moči.
- Pre optimálne výsledky vykonajte test na čerstvej vzorke.

Postup testovania:

1. Neotvárajte testovacie vrecko, kým nie ste pripravená vykonať test.
2. Pred testovaním sa uistite, že test aj vzorka moču majú izbovú teplotu (18°C – 30°C).
3. Odoberte vzorku do suchej a čistej nádoby.
4. Testovací prúžok vyberte z ochranného obalu (vrecka) a uchopte ho za farebnú časť. Opačnej strany sa nedotýkajte, aby nedošlo ku skresleniu výsledku testu.
5. Testovací prúžok ponorte na 10 sekúnd do nádoby so vzorkou moču, ale len po vyznačenú časť (←MAX).
6. Vyberte prúžok a položte ho na rovny, čistý a nesavý povrch.
7. Prečítajte si výsledok do 5-tich minút od vykonania testu. Pred prečítaním výsledku je dôležité, aby bolo pozadie jasné.



Interpretácia výsledku testu:

Negatívny:



Ak sa v testovacej časti objaví len jedna čiarka, prípadne sa objaví druhá čiarka, avšak výrazne bledšia, test je negatívny.

Positívny:



Ak sú v testovacej časti rovnako viditeľné obidve čiarky, prípadne jedna čiarka je rovnaká alebo tmavšia ako druhá čiarka, ovuláciu budete mať pravdepodobne nasledujúcich 24 - 48 hodín. Ak chcete otehotnieť je najlepší čas mať pohlavný styk pred uplynutím 48 hodín.

Chybný:



Ak sa v priebehu 5-tich minút neobjaví žiadny kontrolný pás, výsledok je neplatný a treba ho ignorovať.

Test zlyhal alebo nebol správne dodržaný testovací postup. Overtte testovací postup a zopakujte test s novou testovacou súpravou.



Woman secret

„Right time“

Jednokrokový prúžkový ovulačný test 20v1

Určené na samodiagnostiku

Poznámka:

Výsledky neinterpretujte po viac ako piatich minútach. Aby ste predišli nedorozumeniu, test po piatich minútach zlikvidujte.

Upozornenie:

- Po použití testovacieho prúžku ho zlikvidujte v koši na odpad.
- Testovacia súprava by mala zostať vo fóliovom vrecku až do doby jej použitia.
- Akonáhle ste fóliový obal otvorili, test ihneď použite. Test by mal byť vykonaný do 1 hodiny po otvorení vrečka.
- Nepoužívajte testovaciu súpravu, ak bolo fóliové vrecko poškodené, poškodené alebo otvorené po jeho vytiahnutí z krabičky.
- Nedotýkajte sa membrány umiestenej vnútri okienok.
- Nepoužívajte po dátume expirácie.
- Neprehŕtajte vysušadlo a test uchovávajte mimo dosahu detí.

8. Výsledky testu majú informatívny charakter.

Skladovanie:

Testovaciu súpravu skladujte pri izbovej teplote 2°C až 30°C.
Testovacia súprava by mala byť chránená pred slnečným žiarením, vlhkom a teplom.
Nezmrazujte.

Testovacia súprava obsahuje:

Každé vrecko obsahuje:

- Prúžkový ovulačný test
- Vysušadlo (Vyhodte - Nejedzte).

Každá krabička obsahuje:

- 20 ks fóliových vreciek
- Návod na použitie
- Testovacia nádobka

Charakteristika:

Analytická citlivosť (analytical sensitivity): Detekčný limit pre LH Test je 25 mIU/ml LH. Vzorky moču s koncentráciou LH 25 mIU/ml alebo vyššou vyvolajú pozitívny výsledok.“

Analytická špecifickosť (analytical specificity): Ovulačné testovacie súpravy boli testované so vzorkami roztokov s koncentráciou LH 0 a 25 mIU/ml, ku ktorým boli pridané homologózne hormóny FSH (200 mIU/ml) a TSH (250 µU/ml). Žiadna z látok nemala vplyv na funkčnosť výrobku. Sledovaná špecifickosť - po pridaní hemoglobínu (10mg/ml) bilirubínu (0,06 mg/ml) a albumínu (100mg/ml) - žiadna zo substancií nemala vplyvnú funkčnosť výrobku.

Ďalšie potenciálne interferujúce látky:

Krížová reakcia LH testovacích súprav bola hodnotená s nasledujúcimi látkami uvedenými nižšie v tabuľke. Nebola pozorovaná žiadna krížová reakcia.

Acetaminofén (Paracetamol)	20 mg/ml	Glukóza	20 mg/ml
Kyselina acetylsalicylová	20 mg/ml	Atropín	20 mg/ml
Kyselina askorbová	20 mg/ml	Hemoglobín	1 mg/dl

Klinická štúdia:

Klinická štúdia prebiehala na dvoch klinikách (dve štúdie). V každej štúdií bolo vykonané testovanie so vzorkami od 110 pacientiek (220 celkovo). Pre porovnanie výsledkov testovania bol použitý iný komerčný výrobok s rovnakou citlivosťou ako test, ktorý ste sa rozhodli použiť. Na základe výsledkov bola dokázaná zhoda 100%.

Použité symboly:

	Pozri návod na použitie		Nepoužívať, pokiaľ je poškodený primárny obal
	Nepoužívajte opakovane		Teplotné obmedzenie 2°C - 30°C
	Conformité Européene (Európska zhoda)		Obsah postačuje na <n> skúšok
	Dátum spotreby	P81307	Pridelené registračné číslo ŠÚKL
	Kód šarže		Chrániť pred slnkom
	In Vitro diagnostická pomôcka - určené na samotestovanie		Uchovávať v suchu
	Výrobca (meno spoločnosti, adresa)		

Výrobca a distribútor:



IMPERIAL VITAMINS, s.r.o.

Horná 13, 038 61 Vrútky
Slovensko

tel.: 043/4001082, fax: 043/4001084

e-mail: womansecret@womansecret.sk

web: www.tehotensketesty.sk, www.imperialvitamins.sk



1023 P81307 IVSK-OT-IFO S20/04/2022-04-07

V predaji aj ďalšie testy z rady „Woman secret“

Woman secret „BABY“

Jednokrokový HCG tehotenský test